


bathmate®

J U S T A D D W A T E R

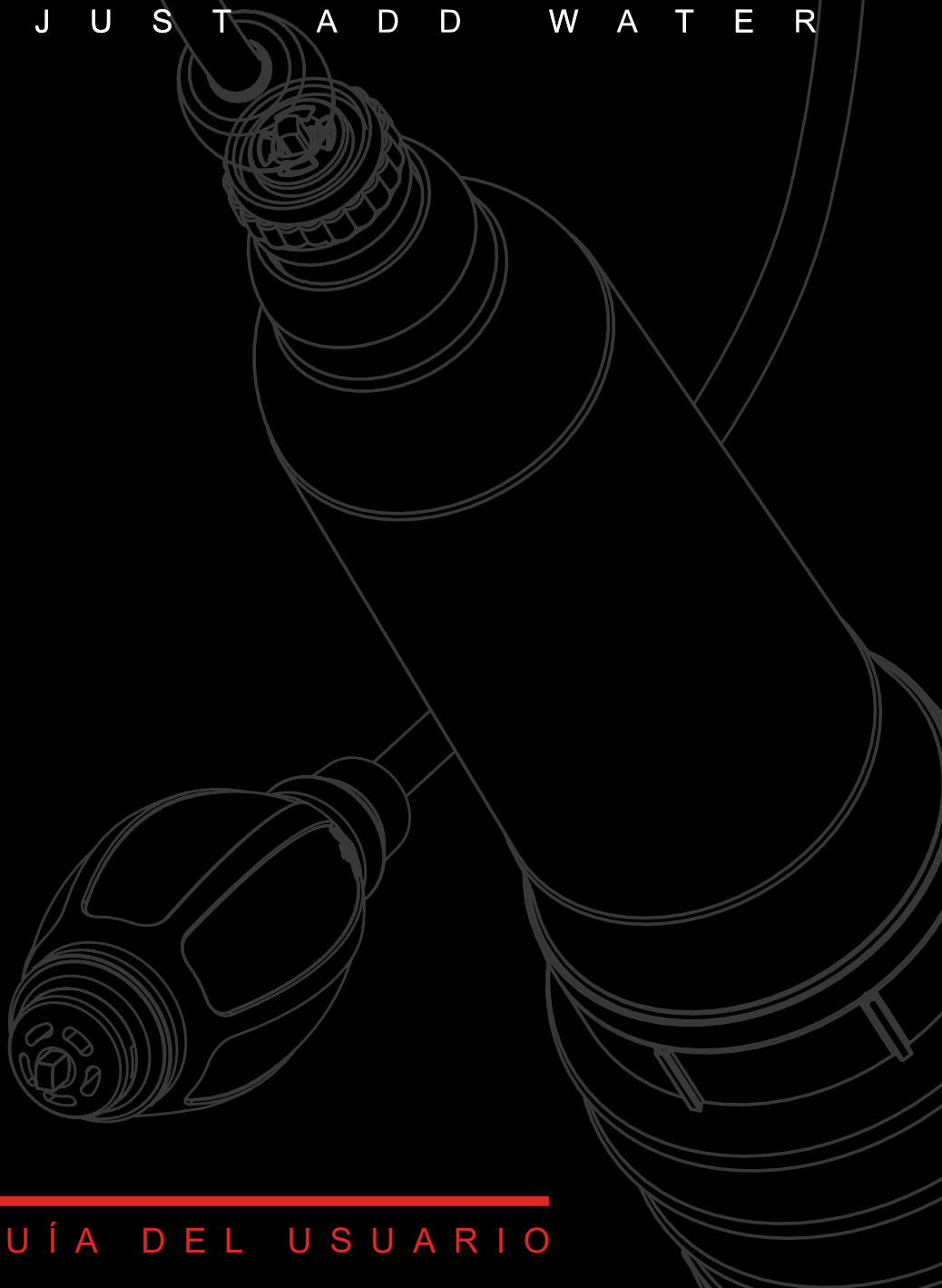


GUÍA DEL USUARIO




CÓMO USAR TU HIDROBOMBA

Usa esta guía del usuario junto con las instrucciones en las siguientes páginas. Esto te permitirá sacar el máximo provecho de tu hidrobomba.

TU HIDROBOMBA

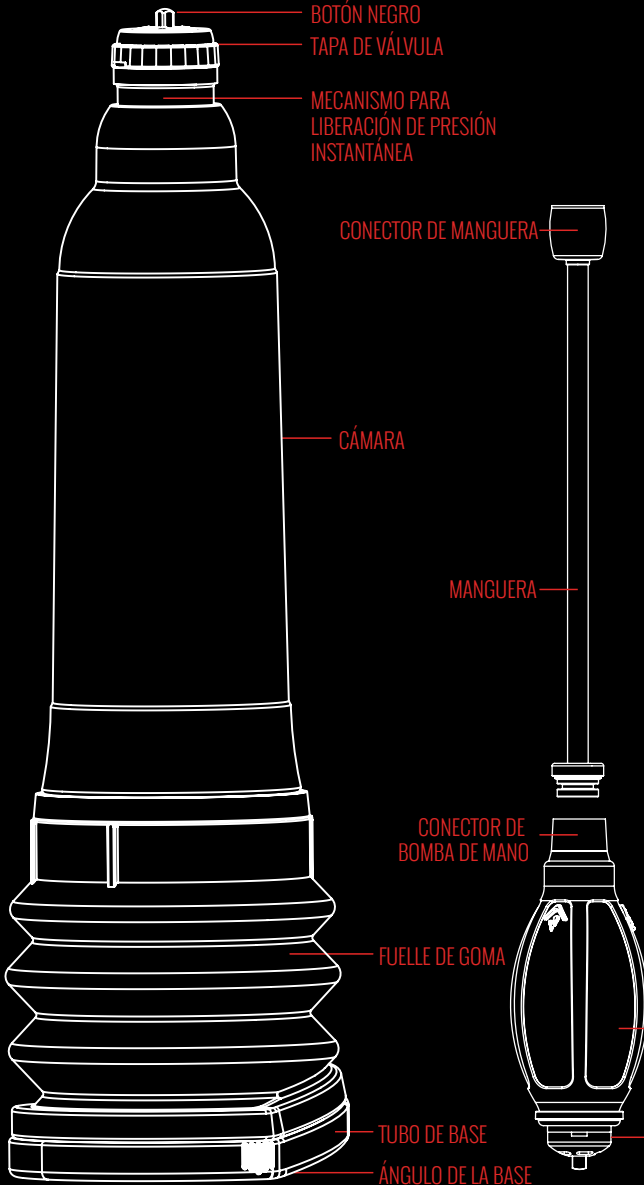












POSICIONES DE VÁLVULA

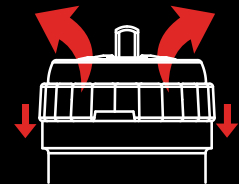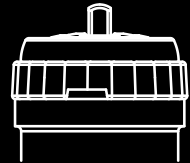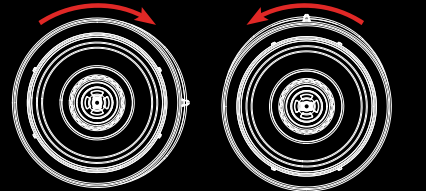

PRESIONANDO LA TAPA DE LA VÁLVULA HACIA ABAJO ACTIVA EL MECANISMO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN FORMA INSTANTÁNEA

BOMBA DE MANO

TAPA DE VÁLVULA DE LA BOMBA DE MANO

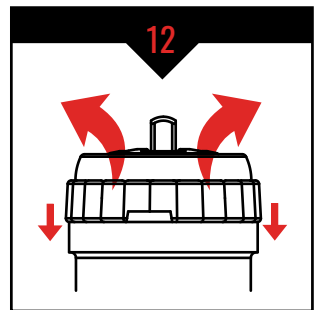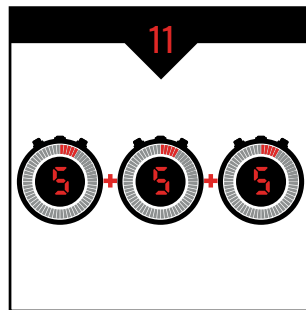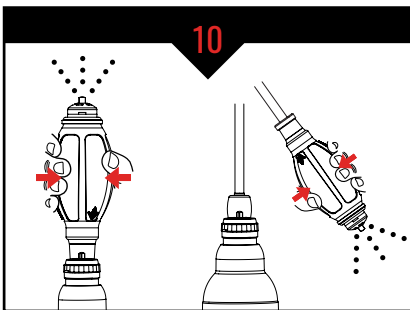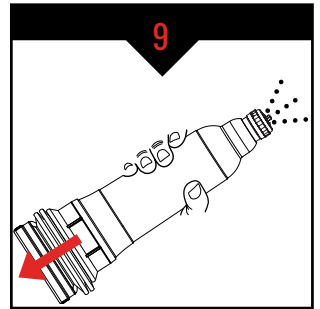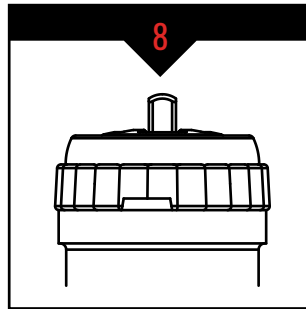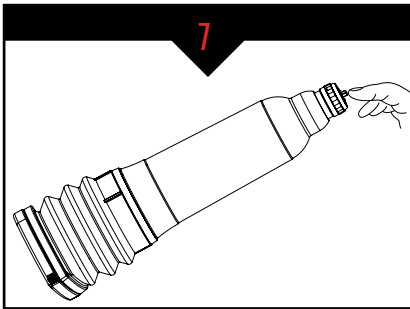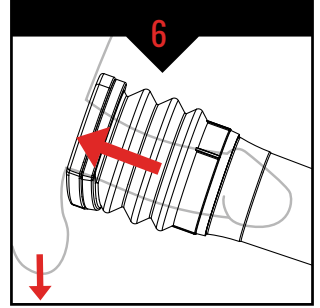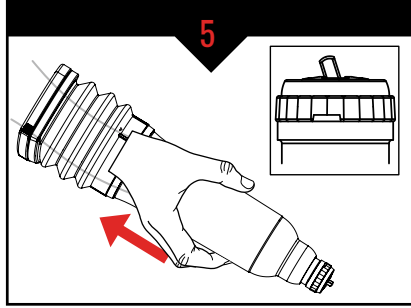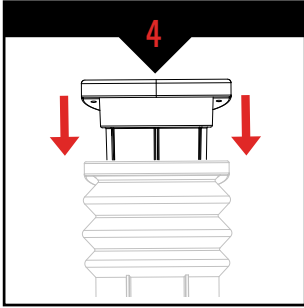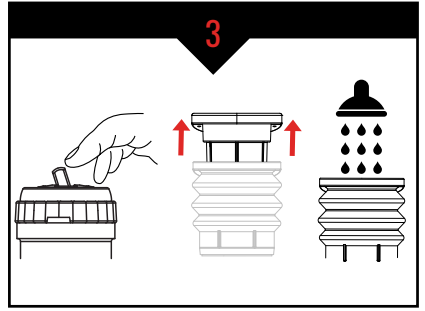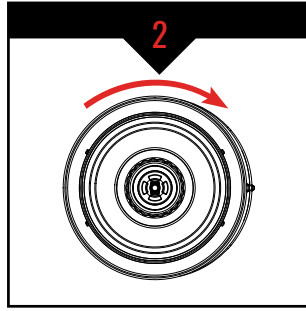

La Hidrobomba Bathmate es un dispositivo externo que facilita el crecimiento del pene. Utiliza tecnología de vacío para aumentar la capacidad de alojar más sangre en los tejidos del pene para así aumentar su tamaño. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.

ANTES DE COMENZAR

Instrucciones de seguridad importantes

- Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si padece alguno de los siguientes síntomas: Síntomas de disfunción eréctil, diabetes, esclerosis múltiple, cirrosis de hígado, insuficiencia renal crónica, alcoholismo, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, cardiopatía o enfermedad pulmonar, presión arterial elevada, enfermedad vascular cerebral, epilepsia, trastorno urinario (por ejemplo, problemas de riñón, vejiga o genitales) o leucemia.
- No utilice este dispositivo si:
 - padece anemia falciforme;
 - tiene un historial de erecciones prolongadas;
 - padece alteraciones hemorrágicas o actualmente toma alguna medicación de reducción de la hemorragia como aspirina.
- La Hidrobomba está diseñada para su uso personal e intransferible.
- Las Hidrobombas de Bathmate están diseñadas para ser utilizadas en el agua, por lo que no se recomienda el uso de ningún tipo de lubricante con este dispositivo.
- Debe tener ambas manos libres para hacer funcionar el mecanismo de liberación del vacío. La falta de fuerza en las manos podría dificultar la retirada segura de este dispositivo.
- Debe mantener el control del producto en todo momento. Evite quedarse dormido mientras utiliza la Hidrobomba.
- No utilice este dispositivo mientras se encuentre bajo los efectos de alcohol o drogas, ya que podría alterar su capacidad de juicio y aumentar el riesgo de lesiones.
- No utilice nunca este dispositivo si tiene una sensación de dolor cada vez menor en la zona del pene, su capacidad para detectar cualquier lesión potencial provocada por el dispositivo podría disminuir.
- La utilización de una bomba de vacío podría contusionar o romper los vasos sanguíneos del pene o el escroto, provocando Petequias, hemorragias o la formación de un hematoma.
- La utilización de una bomba de vacío podría agravar los padecimientos existentes, tales como la enfermedad de Peyronie, el priapismo o la estrechez uretral.
- El mal uso de este dispositivo podría causar una lesión en el pene.
- Si siente dolor agudo o malestar, deje de utilizar el dispositivo de inmediato y consulte a su médico.

PRIMEROS PASOS

Uso recomendado

Con el fin de obtener un beneficio óptimo de la Hidrobomba y evitar un uso inadecuado que pueda provocar malestar, se recomienda encarecidamente que siga las instrucciones descritas a continuación:

ANTES DEL PRIMER USO: Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, luego aclárela abundantemente.

- Asegúrese de que la zona púbica esté bien afeitada. Esto facilitará el sello de vacío contra la base pélvica.
- Es necesario un periodo de relajación de unos minutos en una ducha o baño calientes para que los testículos se ablanden, lo que permite mantenerlos apartados de la zona de sellado y evitar cualquier malestar.
- Aplicar solo la cantidad mínima de presión de vacío necesaria para lograr la erección. Una presión de vacío excesiva y un bombeo demasiado fuerte podrían causar contusiones o lesionar el pene.
- Para lograr los mejores resultados en la rigidez de la erección y un flujo sanguíneo óptimo, lo mejor es retirar el dispositivo cada 2-3 minutos y dejar que el pene se retraiga. Masajee el pene flácido durante 2 minutos y, a continuación, vuelva a aplicar el dispositivo y repita el proceso. Debe hacerlo como máximo 3 veces en una sesión 15 minutos.
- No utilice la Hidrobomba más de 15 minutos cada 24 horas.

Cómo funciona la Hidrobomba

La Hidrobomba funciona creando un sello de vacío en la zona púbica del usuario que rodea al pene flácido. Cuando la bomba se presiona hacia abajo contra el cuerpo, los fuelles se comprimen y el agua es expulsada desde el extremo de la bomba a través de la válvula abierta. Al soltarse, los fuelles se expanden y la válvula se cierra, creándose un vacío parcial dentro de la bomba. Esto hace que el pene se expanda y se llene de sangre, lo que provoca una erección. Al bombear de nuevo, el vacío aumenta al igual que el tamaño de la erección.

El usuario controla la válvula rotando la tapa de la misma en sentido horario para bloquear la válvula y en sentido antihorario para desbloquearla. Cuando la válvula está bloqueada, el vacío interno no puede liberarse. Esta posición se utiliza al bombear o al utilizar la bomba accesoria. Al desbloquearse, la tapa de la válvula puede presionarse hacia dentro contra el muelle. Esto abre la válvula y permite que el aire o el agua vuelvan al cuerpo de la bomba, de forma que el vacío se libera total o parcialmente.

El vacío de las Hidrobombas Bathmate se crea por la fuerza de retroceso elástica de la bomba de fuelles, de forma que el usuario no puede superar los niveles de vacío parcial seguro permitidos por las normativas médicas de Europa y EE. UU.

IMPORTANTE

La punta negra de la parte superior de la válvula se mueve presionando hacia dentro y moviendo hacia la derecha o la izquierda, donde debe hacer "clic" para colocarse en su posición y cerrar la válvula. La posición cerrada solo debe usarse cuando se llena la Hidrobomba de agua en la ducha. El resto del tiempo, la punta negra debe estar en la posición central (abierta). Si la punta negra no está en la posición central, la Hidrobomba no funcionará correctamente.

Uso de la Hidrobomba en la ducha

Si lo desea, puede utilizar la correa de la ducha para tener las manos libres. Para ello, deslice el conector en la Hidrobomba.

1. Relájese unos minutos en la ducha.
2. Bloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido horario.
3. Presione la punta negra con el dedo hasta la posición cerrada, retire el disco de inserción de confort (que evita que el aire quede atrapado) y, a continuación, vuelque la Hidrobomba bajo la ducha hasta que se llene de agua.
4. Sustituya el disco de inserción de confort.
5. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición cerrada. El fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
6. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
7. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, abra la válvula presionando la punta negra hacia la posición central y empiece a bombear.
8. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
9. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se mantengan comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
10. Para aumentar aún más el vacío y lograr un control mayor, utilice la bomba accesoria con la manguera o conectada directamente a la bomba. Tenga en cuenta que la conexión entre la bomba accesoria y la válvula de la Hidrobomba está diseñada para no ser permanente. Por este motivo, la bomba accesoria debe mantenerse en posición mientras se está utilizando, y retirarse cuando se logra el vacío óptimo. Si desea una conexión más permanente, utilice el conector de manguera.
11. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
12. Para quitarse la Hidrobomba, desbloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido antihorario, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula para activar el mecanismo de liberación rápida y deslice la Hidrobomba para extraerla.

Uso de la Hidrobomba en la bañera

1. Relájese unos minutos en la bañera.
2. Retire el disco de inserción de confort (para evitar que el aire quede atrapado) y llene la Hidrobomba con agua de la bañera.
3. Sustituya el disco de inserción de confort.
4. Coloque la Hidrobomba sobre el pene flácido y apriete hasta la base pélvica, manteniendo la punta negra en la posición central (abierta). El fuelle puede colocarse hacia arriba o hacia abajo según le sea más cómodo.
5. Cree un vacío con su cuerpo, asegurándose de que la colocación es cómoda y de que los testículos quedan fuera.
6. Con la Hidrobomba colocada en un ángulo ligeramente hacia arriba, asegúrese de que la punta negra se encuentra en posición central (abierta) y empiece a bombear.
7. Al bombear, asegúrese de que la punta negra se encuentra en la posición central (abierta).
8. Bombee de forma lenta y uniforme hasta que los fuelles se mantengan comprimidos, lo que indica que se ha logrado el vacío óptimo.
9. Para aumentar aún más el vacío y lograr un control mayor, utilice la bomba accesoria con la manguera o conectada directamente a la bomba. Tenga en cuenta que la conexión entre la bomba accesoria y la válvula de la Hidrobomba está diseñada para no ser permanente. Por este motivo, la bomba accesoria debe mantenerse en posición mientras se está utilizando, y retirarse cuando se logra el vacío óptimo. Si desea una conexión más permanente, utilice el conector de manguera.
10. Asegúrese de seguir las instrucciones recomendadas.
11. Para quitarse la Hidrobomba, desbloquee la válvula rotando la tapa de la misma en sentido antihorario, libere el vacío presionando hacia dentro la tapa de la válvula para activar el mecanismo de liberación rápida y deslice la Hidrobomba para extraerla.

Limpieza y mantenimiento

Lave la Hidrobomba con agua caliente y jabón, a continuación aclárela abundantemente. Déjela secar y guárdela en un lugar seco alejado de la luz solar.

Garantía y Atención al cliente

La Hidrobomba Bathmate está diseñada para ser utilizada durante muchos años. Está cubierta por 1 año de garantía en caso de piezas defectuosas o fallos en la fabricación. Para consultar todos los detalles de la garantía y contactar con Atención al cliente, visite:

www.bathmatedirect.com/support

En el caso improbable de una reclamación de la garantía, DX Products Ltd se reserva el derecho de solicitar la devolución de la Hidrobomba o pruebas de los daños.

Código de identificación del producto (PID)





DX Products Ltd utiliza un código de identificación para todos sus productos. Todas las Hidrobombas Bathmate llevan un código PID único de 6 letras que encontrará en la etiqueta de su hidrobomba. Dicho código es la garantía de autenticidad. Le demuestra que está comprando un producto genuino, y no una copia falsa de peor calidad. Utilice su PID para autenticar su producto y registrar en línea la garantía en nuestra página web: **www.bathmatedirect.com/support**

Guía de resolución de problemas: Español

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN	COMENTARIOS
No se produce la erección	No se está creando vacío por una fuga de aire causada por un sellado deficiente	Aplique a su cuerpo una presión firme; aféitese el vello púbico; compruebe si el dispositivo presenta fugas de aire	Este problema suele estar relacionado con la falta de experiencia; se soluciona a medida que se vaya acostumbrando al uso del dispositivo
Erección parcial	El tamaño del cilindro no es el adecuado; el disco de inserción no es el adecuado; no ha practicado lo suficiente	Necesita más práctica de uso del dispositivo; utilice un disco de inserción más grande	El problema suele mejorar con un uso continuado del dispositivo
Tirones en la piel del escroto	Técnica de bombeo incorrecta; disco de inserción demasiado grande; poca práctica de uso	Utilice un disco más pequeño; utilice una técnica de bombeo distinta (consúltelo con su médico); siga practicando; el ángulo del cilindro se encuentra hacia abajo durante el bombeo	Es posible que el problema desaparezca a medida que se vaya adaptando al uso del dispositivo
Malestar o dolor			
Durante el bombeo	Bombeo demasiado rápido; tirones en el tejido del escroto	Bombee más despacio; siga practicando	El problema suele solucionarse a medida que se adapte al uso del dispositivo
Enrojecimiento, irritación o contusiones	Bombeo demasiado rápido; bombeo excesivo	Bombeo más lento; menos bombeo	Consulte a su médico si el problema persiste después de las primeras sesiones prácticas

HOW TO REMOVE THE VALVE CAP CORRECTLY

Regular use of your hydropump will inevitably lead to the build-up of foreign objects inside the valve, which may result in loss of suction. Regularly removing the valve cap from your hydropump and cleaning thoroughly will prevent any build-up and help to ensure that it functions to its full potential.

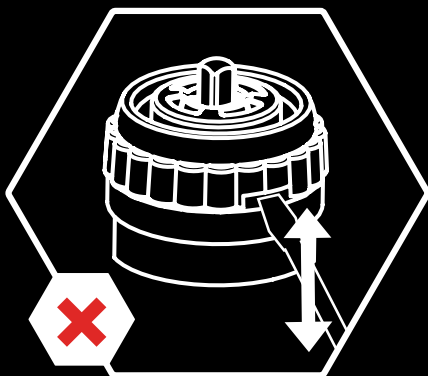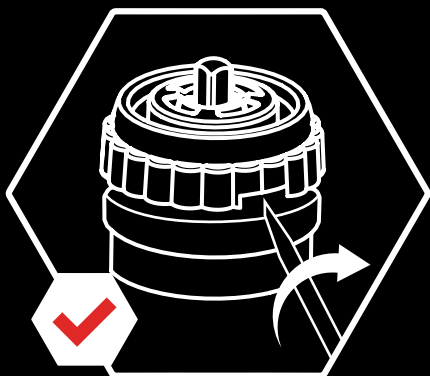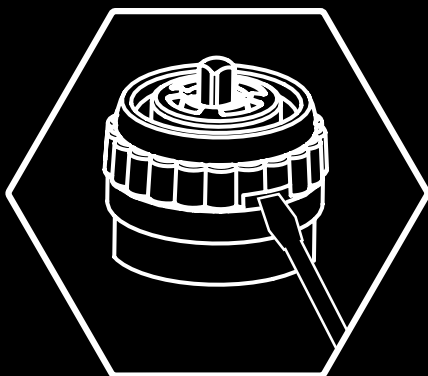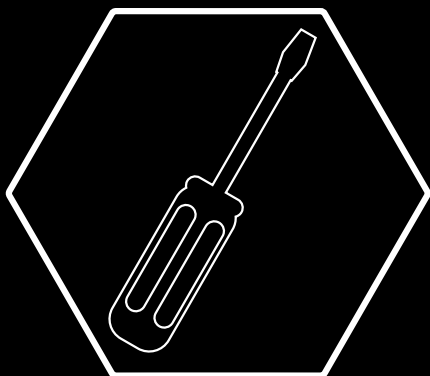


ES. Cuando quite la tapa de la válvula para su limpieza, asegúrese de que gire el destornillador y NO haga palanca.

DERMATOLOGICALLY TESTED


All Bathmate Hydropump products are manufactured from specially selected skin-safe, phthalate free and medical grade materials. Each range has undergone a custom designed dermatological testing study undertaken by a world renowned specialist clinic. Princeton Consumer Research have conclusively passed our Hydropumps as:

“Clinically proven to be safe for use on the intimate genital area”

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You can be assured that Bathmate Hydropumps are safe to use



AFFIX SECURITY STICKER

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

Warranty Registration and Product Identification Code (PID)

All Bathmate Hydropumps are supported with a two year warranty and carry a six letter unique PID code which is your assurance of authenticity and proof that you are buying a genuine Bathmate product, not an inferior counterfeit copy.

You can easily verify your PID and register your Hydropump warranty online at: www.bathmatedirect.com/support

Alternatively, send details of your name, address & Hydropump PID & Serial number to the address below.

Bathmate® and Hydromax® are Worldwide Registered Trademarks.

Bathmate: EU 005210244, USA 3789395, China 10221454 Hydromax: EU 010390904, USA 4303440, INT 1131156 Design
Registration: EU 002111069/2, USA 29/450986 Patent nos: UK 2418686 EU 1799162, USA 7651463, AU 2005278999

See website for more information or email us at : support@bathmatedirect.com

© Worldwide copyright protection - DX Products Ltd

Manufactured in the UK by DX Products Ltd Unit 1, Horbury Jct Ind Est. Calder Vale Rd, Horbury, Wakefield, WF4 5ER, UK
+44 (0) 800 808 5594 support@bathmatedirect.com